


最初に爪のサイズを正しく計測することが非常に重要です。

サイズが合っていない場合、トーグリッПСが爪から外れたり、奥の位置にズれてしまいます。爪のサイズを測る前に、必ず爪を適切な長さに切って下さい。

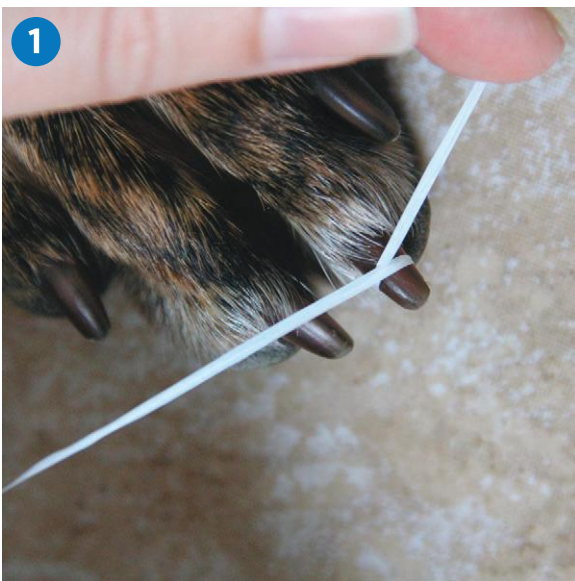

① デンタルフロスなどのヒモ状のものを、各爪の中程辺りに巻き付けます。


② 爪に巻いたヒモを片手で固定します。

③ マジックで巻き付けたヒモが交差している部分に印をつけます。（2ヶ所に印が付きます）

④ ヒモを伸ばし、印が付いた2点の距離（爪の円周）をミリメートル単位で測ります\*

⑤ 前肢と後肢一つずつ（計8爪）について、①～④を繰り返します。（前脚の親指（狼爪）以外すべて）


⑥ 8つの爪の円周の幅（平均ではなく）に応じて、サイズ表から適切なサイズを選びます。（犬によっては、2つのサイズが必要になる場合があります）

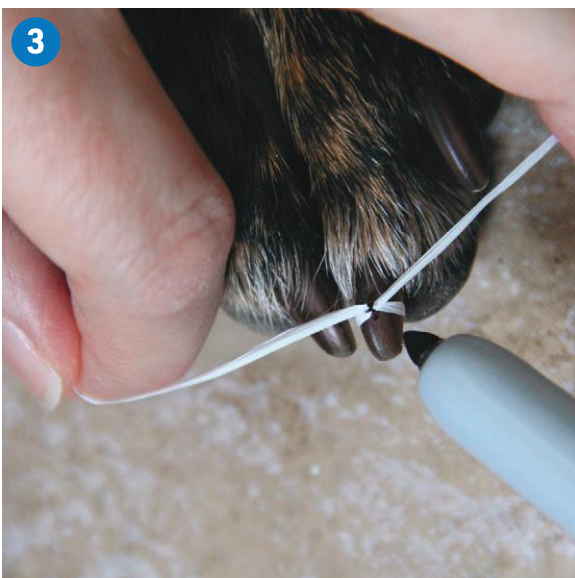

爪の円周	サイズ	色
9-12 mm	XS	黄 
13-15 mm	S	赤 
16-19 mm	M	青 
20-23 mm	L	緑 
24-27 mm	XL	紫 
28-30 mm	XXL	オレンジ 
31-36 mm	XXXL	ネイビー 

装着方法は、製品に同封されている取扱説明書をご参照ください。

ミリメートル定規とサイズ表は、製品同封の取扱説明書の裏面に載っています。

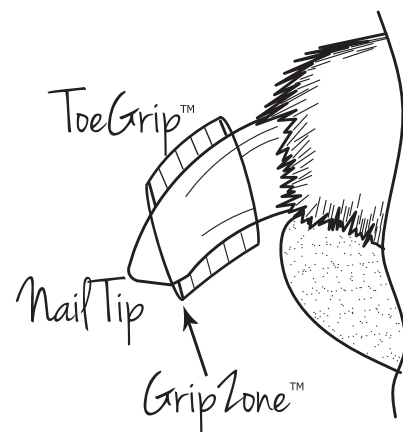

## 重 要

### ☆対象となる犬

トーグリッПСは、老犬やリハビリ中の犬など歩行に難のある犬が装着することにより、床の上での歩行を安定させることができます。

神経障害のある犬は、トーグリッПСを外してしまう場合があります。その場合は、必要に応じ瞬間接着剤を用いて爪に固定させて下さい。

トーグリッПСは若い犬や元気で活発な犬には向いていません。

### ☆サイズ

最初に爪のサイズを正しく計測することが非常に重要です。

サイズが合っていない場合、トーグリッПСが爪から外れたり、奥の位置にズれてしまいます。爪のサイズを測る前に、必ず爪を適切な長さに切って下さい。

### ☆使い方

16個のトーグリッПСを消毒用アルコールに浸け、濡れた状態で爪にはめることでスムーズに装着できます。

製品に同封の取扱説明書に装着手順が図示されています。

必ず、図の通りの「グリップゾーン」ができる位置に装着して下さい。

上手く使うためには正しい位置につけることが大切です。

### ☆飼い主指導

稀にトーグリッПСが爪床までズれて、傷つけてしまうことがあります。

トーグリッПСを正しい位置に装着するように指導して下さい。

トーグリッПСは、犬の大きさ、環境、歩行状態によって、1~3ヶ月程度で取り替える必要があります。歩行に異常がある犬ほどトーグリッПСをより早く付け替えることになります。